



никамед



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

🔍

• [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)

• [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

НИКАМЕД | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Эластичный бандаж на коленный сустав с ребрами жесткости (МКН-103 (М))



## Изделия протезно-ортопедические: Эластичный бандаж на коленный сустав с ребрами жесткости (МКН-103 (М))



Артикул: MKN-103(M)

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

## Описание

Бандаж ORLETT MKN-103(M) обеспечивает легкую степень фиксации коленного сустава, способствует снижению болевого синдрома и улучшению кровоснабжения мягких тканей зоны коленного сустава. Выполнен из современного материала, состоящего из особых полиэфирных волокон с четырехлепестковым поперечным сечением, которые обеспечивают активную транспортировку влаги с поверхности кожи.

Спиральные ребра жесткости обеспечивают правильное позиционирование бандажа в зоне коленного сустава и обладают противоскручивающим эффектом.

Степень фиксации: легкая.

Линейка: Medical Line.

Состав: 23% полиэстер, 21% хлопок, 17% латекс, 11% эластан, 28% сталь.

## Показания

- Консервативная терапия травм коленного сустава легкой степени.
- Воспалительно-дегенеративные заболевания коленного сустава, сопровождающиеся болевым синдромом.
- Вторичная реабилитация после травм и операций на коленном суставе.
- Профилактика травм и обострений воспалительно-дегенеративных заболеваний коленного сустава.

**Цвета:** бежевый.

Размеры: S, M, L, XL, XXL.

## Подбор размеров

Для корректного подбора бандажа на коленный сустав ORLETT MKN-103(M) необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность середины коленного сустава.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

### Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S	M	L	XL	XXL
ОКРУЖНОСТЬ СЕРЕДИНЫ КОЛЕННОГО СУСТАВА, СМ	30-35	35-40	40-45	45-50	>50



Инструкция: [Скачать](#)

### Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

## Сертификаты



[Версия для печати](#)

