



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Регулируемый ортез на голеностопный сустав (HAS-301)



Изделия протезно-ортопедические: Регулируемый ортез на голеностопный сустав (HAS-301)





Артикул: HAS-301

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Ортез ORLETT HAS-301 стабилизирует и разгружает голеностопный сустав. При необходимости позволяет полностью иммобилизовать голеностопный сустав или расширять объемы сгибания-разгибания (с шагом в 10°), сохраняя боковую стабилизацию. Конструкция ортеза позволяет иммобилизовать сустав в положении подошвенного сгибания и тыльного разгибания (при повреждениях ахиллова сухожилия). Перекат подошвы минимизирует нагрузку на стопу при ходьбе.

Подушки-подпяточники снижают ударные нагрузки на голеностопный сустав и амортизируют при ходьбе. Ортез способствует разгрузке пяточной кости, что в сочетании с широкой подошвой, позволяющей надевать ортез поверх послеоперационных повязок, способствует ранней мобилизации больного и сокращению сроков выздоровления.

Степень фиксации: переменная.

Линейка: Medical Line.

Состав: 20% полиамид, 18% полиуретан, 14% полиэстер, 7% полиуретан, 2% хлопок, 25% алюминий, 8% сталь, 6% полиэтилен.

Показания

- Ранняя функциональная терапия при повреждениях связочного аппарата голеностопного сустава, травмах лодыжек, внутрисуставных переломах; после реконструктивных операций на голеностопном суставе.
- Параличи и парезы стопы.
- Послеоперационная и консервативная терапии переломов малоберцовой кости, предплюсны и плюсны.

Цвета: черный.

Размеры: S, M, L, XL.

Подбор размеров

Регулируемый ортез на голеностопный сустав HAS-301 подбирается по размеру обуви.

Согласно таблице размеров подбирается подходящий размер ортеза ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S	M	L	XL
РАЗМЕР ОБУВИ	< 37	37-41	41-44	>44



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



[Версия для печати](#)

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

Обратная связь



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.

[illegible]

