



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)



- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические: Эластичный бандаж на голеностопный сустав (MAN-101)



Изделия протезно-ортопедические: Эластичный бандаж на голеностопный сустав (MAN-101)





Артикул: MAN-101

[Предыдущий](#)

[Следующий](#)

Описание

Бандаж на голеностопный сустав ORLETT MAN-101 за счёт компрессии и массирующего действия стимулирует микроциркуляцию в области голеностопного сустава, уменьшает болевые ощущения и способствует устранению отёков. Выполнен из современного материала, состоящего из особых полиэфирных волокон с четырёхлепестковым поперечным сечением, которые обеспечивают активную транспортировку влаги с поверхности кожи на внешнюю поверхность бандажа.

Степень фиксации: легкая.

Линейка: Medical Line.

Состав: 32% полиэстер, 30% хлопок, 15% эластан, 23% латекс.

Показания

- Вторичная реабилитация после травм и операций на голеностопном суставе.
- Воспалительно-дегенеративные заболевания голеностопного сустава.
- Травмы связок голеностопного сустава легкой и средней степени тяжести.
- Профилактика обострений воспалительно-дегенеративных заболеваний голеностопного сустава.

Цвета: бежевый.

Размеры: XS, S, M, L, XL, XXL.

Подбор размеров

Для корректного подбора бандажа на голеностопный сустав ORLETT MAN-101 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность голени выше лодыжек.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Таблица подбора размеров:

