



Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86

[Купить в розницу](#)

[О компании](#) [Новости](#) [Каталог](#) [Оптовым клиентам](#) [Контакты](#) [Личный кабинет](#)

Q ▾

- [Справочник медицинских ортопедических изделий](#)
- [Купить в розницу](#)

[Наши новинки](#)

[Каталог](#)

[продукции](#)

[НИКАМЕД](#) | [Каталог](#) | [ORLETT](#) | Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Бандаж для беременных усиленный (MS-99)



Изделия протезно-ортопедические на верхние конечности: Бандаж для беременных усиленный (MS-99)



Артикул: MS- 99

[Предыдущий](#)
[Следующий](#)

Описание

Бандаж-корсет (дородовый для беременных) ORLETT MS-99 осуществляет поддержку живота, способствуя нормализации положения плода, снижает нагрузку на поясничный отдел позвоночника за счет фиксации поясничной области при помощи ребер жесткости, уменьшает дискомфорт и боли в спине. Способствует снижению риска развития гипертонуса матки, предупреждению излишнего растяжения мышц и кожи и появлению «растяжек» живота, особенно при многоводии, многоплодии.

Линейка: Medical Line.

Состав: 30% полиэстер, 25% полиамид, 10% полиуретан, 10% хлопок, 8% эластан, 5% латекс, 10% сталь, 2% поливинилхлорид.

Показания

- Поддержка живота во II и III триместрах беременности.
- Болевой синдром в поясничном отделе позвоночника, не связанный с какой-либо патологией.

- Многоплодие.
- Многоводие.
- Профилактика осложнений беременности.

Цвета: белый, бежевый.

Размеры: S, M, L, XL, XXL.

Подбор размеров

Для корректного подбора размера усиленного бандажа для беременных ORLETT MS-99 необходимо сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность туловища сзади на уровне поясничного отдела, спереди под животом.

Затем, согласно таблице размеров подбирается подходящий размер бандажа ORLETT.

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить бандаж. Важно, чтобы бандаж был удобен.

Таблица подбора размеров:

РАЗМЕР	S	M	L	XL	XXL
ОКРУЖНОСТЬ ТУЛОВИЩА ПОД ЖИВОТОМ, СМ	<85	85-97	97-105	105-115	>115



Инструкция: [Скачать](#)

Примечание:

Перед применением/использованием необходимо ознакомиться с инструкцией на товар и проконсультироваться у специалиста о противопоказаниях.

Сертификаты



Версия для печати

127015, Москва, Бумажный пр-д., д. 14, стр. 2
 Дирекция по оптовым продажам: +7 (495) 609-63-33, +7 (495) 609-63-86
 Для розничных покупателей: +7 (495) 77-55-000, +7 (800) 33-33-112

[Обратная связь](#)



© 2006-2022, ООО «НИКАМЕД». Копирование материалов запрещено.



[illegible]