

medical line



ORLETT

Зарегистрировано в Росздравнадзоре



Инструкция по применению
ортопедических изделий

ОРТЕЗ НА КОЛЕННЫЙ СУСТАВ

SO-303

WWW.ORLETT.RU

СВОЙСТВА МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Ортез Orlett на коленный сустав с возможностью регулировки объема движения, арт. SO-303, разгружает и стабилизирует коленный сустав в боковой и саггитальной плоскостях. Защищает от переразгибания и чрезмерного сгибания в суставе. Диапазон ограниченный движения: разгибание – 0°, 10°, 20°, 30°, 40°; сгибание – 45°, 60°, 75°, 90°.

Отпускается без рецепта.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- реабилитация после оперативных вмешательств на капсульно-связочном аппарате коленного сустава, реконструктивных операций на менисках;
- повреждения или разрывы одной или обеих крестообразных связок (передней и/или задней, а также боковых связок коленного сустава);
- выраженная и (или) сочетанная хроническая нестабильность связочного аппарата вследствие травм или дегенеративных заболеваний коленного сустава;
- рекурвация коленного сустава;
- реабилитация после спортивных травм.

РЕЖИМ И СРОКИ НОШЕНИЯ

Режим и сроки ношения ортеза назначает лечащий врач. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- индивидуальная непереносимость материалов;
- гнойно-септические заболевания кожи в области применения ортеза.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

КОНСТРУКЦИЯ

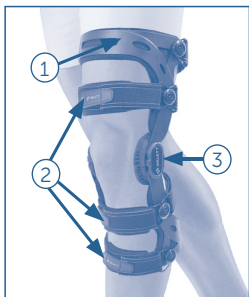


рис. 1

Ортез Orlett, арт. SO-303, на коленный сустав с полицентрическими шарнирами состоит из следующих элементов (цифры на рисунке соответствуют элементам конструкции):

1. Металлическая рама.
2. Фиксирующие ремни на бедре и на голени.
3. Полицентрические шарниры.

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ

1. Расстегните все ремни с застежками велкро.
2. Установите на обоих шарнирах необходимый диапазон движения (см. порядок установки необходимого диапазона движения или угла сгибания-разгибания в шарнирах).
3. Расположите раму ортеза так, чтобы центры шарниров находились приблизительно на уровне верхнего края надколенника. При этом ортез окажется несколько выше, чем необходимо, однако при движении он займет правильное положение.
4. Застегните фиксирующие ремни, соблюдая последовательность застегивания ремней, отмеченную маркировкой, нанесенной на передние части ремней-застежек (1-2-3-4-5-6).
5. Затяните все ремни так, чтобы ортез плотно облегал ногу, но при этом не вызывал дискомфорта.
6. Попросите пациента походить в ортезе в течение 10-15 минут, после чего расстегните все ремни и снова застегните их в указанном выше порядке. Это необходимо для предупреждения возникновения отека и сдавления тканей.

ВНИМАНИЕ!

Не следует затягивать слишком сильно фиксирующие ремни во избежание нарушений кровообращения.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ НЕОБХОДИМОГО ДИАПАЗОНА ДВИЖЕНИЯ ИЛИ УГЛА СГИБАНИЯ-РАЗГИБАНИЯ

1. Откройте защитную крышку (рис. 2).
2. С помощью набора ограничителей сгибания и разгибания (рис. 3) установите необходимый диапазон движения. Медиальный и латеральный шарниры должны иметь одинаковые установки.
3. Закройте защитную крышку.



рис. 2



рис. 3

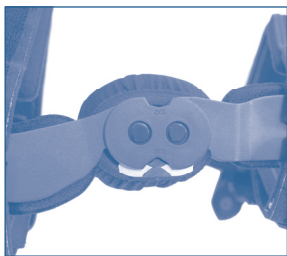


рис. 4



рис. 5

ВНИМАНИЕ!

Необходимый диапазон движений выставляется под контролем лечащего врача.

Самостоятельное и бесконтрольное изменение установок шарниров пациентом недопустимо.

ПРАВИЛА ПОДБОРА



Для подбора ортеза Orlett на коленный сустав с регуляторами объема движения, арт. SO-303, сантиметровой лентой плотно, но не утягивая, измерить окружность бедра на уровне 15 см выше середины коленной чашечки и окружность голени на 12 см ниже середины коленного сустава.

Согласно полученным данным подобрать ортез по таблице подбора размеров.

ТАБЛИЦА ПОДБОРА РАЗМЕРОВ

Размер	Окружность бедра на 15 см выше середины коленного сустава, см	Окружность голени на 12 см ниже середины коленного сустава, см
S	31-39	21-29
M	39-47	29-37
L	47-54	37-43
XL	54-60	43-50

Чтобы проверить правильность выбора размера, рекомендуется примерить ортез. Важно, чтобы ортез был удобен.

ПРАВИЛА УХОДА

Металлическую раму ортеза можно протирать мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе. Перед стиркой съемные мягкие детали необходимо отстегнуть. Для мягких деталей предусмотрена машинная стирка в деликатном режиме при температуре не выше 40°C.

Ремни и подушечки рекомендуется стирать после 3-5 применений изделия. Обращаться с осторожностью. Не применять хлорсодержащие средства. Глажение запрещено. Пропаривание и обработку паром не применять. Сухая чистка/химчистка запрещена. Удаление пятен растворителями запрещено. Не применять сушку в барабане. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. После высыхания мягкие детали пристегнуть к пластиковым частям боковых панелей и бедренной гильзы.



СОСТАВ

70% алюминий, 8% сталь, 1% медь, 7% этиленвинилацетат, 5% нейлон, 3% полиамид, 2% полипропилен, 2% спандекс, 2% полиэстер.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Орtez должен храниться при комнатной температуре, в сухом помещении, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Орtez утилизировать с бытовым мусором.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен.

Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие арт. SO-303, инструкция по применению.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

6 месяцев с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению и правил ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

К ВНЕШНЕМУ ВИДУ И ПОДБОРУ РАЗМЕРА ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮ

Дата покупки: _____

Подпись покупателя: _____



Изделия протезно-ортопедические: ортезы на нижние конечности: на коленный сустав: арт. SO-303.

Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/09552 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС RU Д-ДЕ.НА38.В.00223/20 (с 17.03.2020 г. по 16.03.2023 г.) выдана ООО «Сервис Плюс».

Производитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Арт.: INT021-SO-303-N1_11/21