



## СТУЛ ДЛЯ ВАННОЙ

---

Инструкция по применению



Модель: BWC-310

---

---

Благодарим Вас за приобретение стула для ванной BWC-310 марки BRONIGEN. Стул для ванной является изделием медицинского назначения. Для его производства используется высококачественная хромированная сталь и материалы, обеспечивающие надёжную и долгосрочную эксплуатацию. Деревянное сиденье имеет специальное влагоустойчивое покрытие. Стул имеет раздвижную опору и подходит для стандартных ванн шириной 70-82 см.

## Комплектация

- Стул с деревянным сиденьем, 1 шт.
- Инструкция по применению, 1 шт.

## Назначение

Стул для ванной предназначен для облегчения ухода за тяжелобольными и инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

**Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.**

## Область применения

Стул может быть использован как в домашних условиях, так и в медицинских учреждениях.

## Оказываемые эффекты

Стул для ванной позволяет пациентам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата удобно совершать водные процедуры в ванне.

## Порядок установки и принцип действия

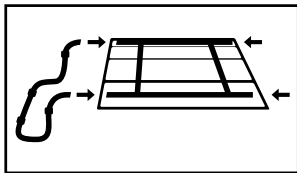


рис. 1

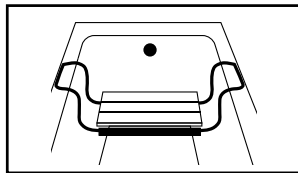


рис. 2

- Выньте стул из упаковки.
  - Вставьте левый поручень в металлическое основание и зафиксируйте его (рис. 1).
  - Затем вставьте правый поручень и зафиксируйте его.
  - Установите расстояние между поручнями, подходящее для ширины Вашей ванны.
-

- 
- 
- Поставьте стул в ванну и убедитесь, что установленные на поручнях пластиковые насадки против скольжения плотно фиксируют стул и препятствуют скольжению (рис. 2).

## **Противопоказания**

Перед использованием изделия проконсультируйтесь с лечащим врачом.

## **Меры предосторожности**

Перед использованием стула убедитесь, что все детали стула прочно закреплены.

Проверьте, чтобы поручни стула прочно опирались на боковые края ванны и не скользили.

## **Правила ухода**

- Для чистки стула используйте нейтральные моющие средства. Не применяйте растворители (спирт, ацетон и др.), а также сильнорезирующие моющие средства.
- Во избежание царапин и нарушения влагостойкого покрытия не применяйте абразивные вещества и абразивные губки.
- После каждого использования необходимо вытереть все части стула насухо.

## **Правила хранения**

- Храните стул в сухом месте.
- Температура хранения стула от  $-20^{\circ}\text{C}$  до  $+60^{\circ}\text{C}$ .

## **Правила утилизации**

Утилизация стула осуществляется по правилам утилизации стальных изделий, действующим на территории потребителя.

## **Технические характеристики:**

Ширина сиденья, см	37
Глубина сиденья, см	28
Высота поручней, см	16
Расстояние между поручнями, см	67–81
Максимальная нагрузка, кг	100
Вес, кг	2,3

---

---

## Гарантии производителя

Гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня продажи.

Срок службы стульев для ванны составляет 2 года.

Гарантия производителя распространяется на стулья для ванны при отсутствии повреждений вследствие удара, механического воздействия или внесения изменений в конструкцию.

## Гарантийными случаями не являются

- Повреждения, вызванные использованием товара не по назначению.
- Дефекты, возникшие как следствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием.

**Торговая организация**

(название, адрес, контактный телефон)

**Дата продажи**

**Печать торговой организации**

**Подпись продавца**

**С условиями гарантии ознакомлен**

**Подпись покупателя**



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10203 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01707 (с 27.06.2014 г. по 26.06.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИНМАШ».

**Изготовитель:** Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

**Импортер:** ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

**Претензии направлять:** Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: [skk@nikamed.ru](mailto:skk@nikamed.ru).