



КРЕСЛО-СТУЛ С САНИТАРНЫМ ОСНАЩЕНИЕМ

Инструкция по эксплуатации



Модель: BWC-130 унив.

Кресло-стул с санитарным оснащением BWC-130 изготовлено из современных материалов, обеспечивающих долгосрочную эксплуатацию изделия. Перед началом использования кресла-туалета ознакомьтесь, пожалуйста, с инструкцией по применению, что поможет Вам использовать изделие наиболее эффективно.

Комплектация

- Кресло-стул, 1 шт.
- Санитарное судно, 1 шт.
- Пластиковое сиденье с крышкой, 1 шт.
- Инструкция, 1 шт.

Назначение

Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для облегчения ухода за тяжелобольными и инвалидами с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены. Изделие предназначено для многократного личного использования.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Область применения

Кресла-стулья с санитарным оснащением используются как в стационарных медицинских учреждениях, так и в домашних условиях.

Оказываемые эффекты

Кресла-стулья с санитарным оснащением позволяют пациентам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата более удобно совершать действия, связанные с отправлением естественных потребностей организма.

Принцип действия

Кресло-стул оснащено опускающимися подлокотниками и съёмной опорой для спины.


Пластиковое сиденье с крышкой крепится на заднюю раму. При откидывании крышка служит дополнительной опорой для спины. Пластиковое санитарное судно легко снимается для опорожнения.

Противопоказания

Не выявлены.

Правила использования

- Соберите кресло-стул, как изображено на обложке.
- Установите необходимую высоту стула с помощью кнопочных фиксаторов на каждой ножке. Перед использованием убедитесь, что все ножки установлены на одинаковую высоту и заблокированы фиксатором.
- Для опускания подлокотника нажмите на фиксатор, расположенный в передней части подлокотника.
- В случае хранения кресла-стула в холодном помеще-

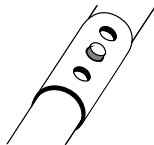

нии перед креплением пластикового сиденья и крышки необходимо сначала нагреть их до комнатной температуры, а затем зафиксировать на задней раме.

- После каждого использования туалета проводите санитарно-гигиеническую обработку судна и поручней кресла-стула.
- Ножки кресла-стула оснащены резиновыми насадками, снижающими эффект скольжения. В случае износа насадок необходимо заменить их на новые.

Правила ухода

- Для чистки кресла-стула используйте тёплую воду с нейтральным моющим средством. После чистки вытрите все детали насухо тряпочкой.
- Не применяйте растворители (спирт, ацетон и др.), а также сильнодействующие моющие средства.
- Не применяйте абразивные вещества и инструменты.

Меры предосторожности

- Предохраняйте кресло-стул от ударов и повреждений.
- Не допускайте прикосновения кресла-стула к электрическим проводам.

Правила хранения

- Храните кресло-стул после использования в сухом чистом месте.
- Не подвергайте кресло-стул воздействию высокой температуры, влажности и пыли.
- Температура хранения кресла-стула от -20°С до +60°С.
- Оберегайте кресло-стул от воздействия прямых солнечных лучей.

Срок годности

Срок годности не установлен.

По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Отпускается без рецепта.

Правила утилизации

Утилизация кресла-стула осуществляется по правилам утилизации лома, содержащего сталь, и отходов полимерных материалов, действующим на территории потребителя.

Технические характеристики

Масса (кг)	9
Грузоподъемность (кг)	135
Глубина сиденья (мм)	420
Ширина между поручнями (мм)	520
Высота сиденья (мм)	500-600
Габаритные размеры (ДхШ, мм)	490х600

Гарантии производителя

Гарантийный срок составляет 6 месяцев со дня продажи.

Срок службы кресел-стульев составляет 2 года.

Гарантия производителя распространяется на кресла-стулья при отсутствии повреждений вследствие удара, механического воздействия, несанкционированного ремонта или внесения изменений в конструкцию.

Торговая организация

(название, адрес, контактный телефон)

Дата продажи

Печать торговой организации

Подпись продавца

С условиями гарантии ознакомлен

Подпись покупателя



Товар является медицинским изделием.

Регистрационное удостоверение № ФСЗ 2011/10203 от 26.06.2014 г. выдано Росздравнадзором, срок действия не ограничен.

Декларация о соответствии № РОСС DE.МЕ20.Д01707 (с 27.06.2014 г. по 26.06.2017 г.) выдана органом по сертификации «Сертиформ ВНИИНМАШ».

Изготовитель: Рехард Технолоджис ГмбХ, Германия, 10785, Берлин, Потсдамер штрассе, 92.

Импортер: ООО «Орто Медикл Групп», Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.

Претензии направлять: Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.