

© Nea



I 2036-30 2 / 3

Designed in the Netherlands
Made in the EU

www.push.eu

The Netherlands
6199 AB Maastricht-Airport
Europalaan 31
Nea International bv



2.30.2



MED

Ортез на коленную чашечку
PATELLA BRACE



Инструкция по применению



• ru

Продукция Push med представляет апробированные врачами и учеными эффективные решения для лечения и предотвращения травм опорно-двигательного аппарата.

Новые ортезы Push med представляют собой медицинскую продукцию, которая характеризуется высоким уровнем эффективности, комфорта и качества. Фиксация сильной степени и регулируемая компрессия эффективно стабилизируют сустав и снижают болевые ощущения. Продукция Push med является инновационной и произведена для Вас с особой тщательностью для максимальной безопасности и комфортного использования.

Перед использованием ортеза внимательно прочитайте инструкцию.

Если у Вас имеются какие-либо вопросы, пожалуйста, обратитесь за консультацией к дистрибьютору или отправьте электронное письмо по адресу sales@nikamed.ru

ОРТЕЗ НА КОЛЕННУЮ ЧАШЕЧКУ PUSH MED PATELLA BRACE АРТИКУЛ: 2.30.2

НАЗНАЧЕНИЕ/ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- Пателло-фemorальный болевой синдром.
- Тендинит коленной чашечки сухожилия.
- Колено прыгуна (Arthritis patellae).
- Болезнь Осгуд-Шляттера.
- Подвывихи/гиперподвижность проксимального тибioфибулярного сочленения.

Перед применением рекомендуется проконсультироваться со специалистом. Изделие предназначено для многократного личного использования. Возможные последствия при использовании товара не по назначению не выявлены.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ

Расположите пелот ортеза строго по центру сразу под коленной чашечкой и зафиксируйте лентой с застежкой-липучкой «Велкро».

РЕЖИМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Определяется индивидуально по назначению лечащего врача.

- Специалисты компании-дистрибьютора объяснят Вам правила надевания ортеза Push med Patella Brace.
- Сохраните вкладыш с информацией о продукции, чтобы всегда иметь возможность прочесть инструкции по правильному использованию ортеза.
- Функциональность снижается при износе отдельных элементов ортеза Push med Patella Brace или при расхождении швов. Не забывайте проверять ортез Push med Patella Brace на наличие признаков повреждения перед каждым использованием.

СВОЙСТВА ТОВАРА/ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЭФФЕКТЫ

Ортез Push med Patella Brace на коленную чашечку обеспечивает фиксацию собственной связки надколенника (коленной чашечки) и поддерживает коленную чашечку. Это позволяет перераспределять нагрузку и существенно снижать интенсивность болей. Полужесткий пелот ортеза выполнен из эластичного полимера. Анатомическая форма позволяет ортезу оставаться на месте при движениях коленного сустава.

Высококачественный комфортный материал Sympress™ обеспечивает оптимальный влаго-воздухообмен (система термоконтроля).

Ортез Push med Patella Brace на коленную чашечку удобен для самостоятельного наложения без посторонней помощи и рассчитан на регулярный гигиенический уход (стирку).



Артикул	2.30.2
Производитель	NEA International BV (NEA Интернешнл БиВи) www.push.eu
Импортер	ООО «Орто Медикл Групп» Россия, 143405, Московская область, г. Красногорск, Ильинское шоссе, д. 16, корп. 1.
Претензии направлять	Россия, 127220, Москва, а/я № 58, ООО «НИКАМЕД» представитель в России и СНГ, тел.: 8-800-33-33-112, e-mail: skk@nikamed.ru.

Товар является медицинским изделием
Отпускается без рецепта

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2009/04876 от 29.03.2016 г.
выдано Росздравнадзором,
срок действия не ограничен



Декларация о соответствии
№ РОСС NL.АЯ46.Д72396
(с 04.04.2016 г. по 04.04.2019 г.) выдана ЗАО
«Региональный орган по сертификации и
тестированию»



ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Противопоказаний к использованию ортеза Push med Patella Brace на коленную чашечку не выявлено.

Избегайте чрезмерно тугого наложения ортеза Push med Patella Brace на коленную чашечку для предотвращения симптомов нарушения периферического кровоснабжения в голени и стопе.


В случае сохранения боли или ухудшения состояния обязательно обратитесь за консультацией к лечащему врачу.

ПОДБОР РАЗМЕРА

Ортез Push med Patella Brace на коленную чашечку выпускается в одном универсальном размере, позволяющим с комфортом фиксировать ортез на подколенной области при диапазоне окружности колена от 28 до 45 сантиметров.

ПРАВИЛА УХОДА

Перед стиркой застегните застежки «Велкро». Машинная стирка в щадящем (деликатном) режиме или ручная стирка при температуре не выше +30 °С. Не применять хлорсодержащие моющие и отбеливающие средства. Сушить не отжимая, вдали от нагревательных приборов и прямых солнечных лучей. Чтобы продлить срок службы, после стирки ортез следует просушить.

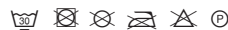

СОСТАВ

Ортез изготовлен из высококачественного комфортного материала Sympress™. Использование микроволокон обеспечивает ощущение мягкости и поддерживает кожу сухой.

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Универсальный

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Ортопедическое изделие, инструкция по применению.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности не установлен. По окончании периода использования товар не представляет опасности для потребителя и подлежит утилизации. Возможность использования ортеза дольше, чем предписано курсом лечения, должна быть согласована с врачом. Не допускается прекращение использования ортеза без согласования с лечащим врачом. Не допускается самостоятельное изменение конструкции ортеза. Не допускается эксплуатация поврежденного ортеза.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

90 дней с момента продажи при соблюдении инструкции.

ГАРАНТИЙНЫМИ СЛУЧАЯМИ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ

- механические повреждения (включая случайные);
- повреждения, вызванные использованием товара не по назначению;
- дефекты, возникшие вследствие нарушения инструкции по применению, правил хранения и ухода за изделием;
- несанкционированный ремонт или внесение изменений в конструкцию.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Изделия должны храниться при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от источников тепла, прямого солнечного света и пыли.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ

Изделие утилизировать с бытовым мусором.

ПРАВИЛА НАДЕВАНИЯ АРТИКУЛ: 2.30.2

